



BENUTZERHANDBUCH – DE
IN 25635 Elektrorollstuhl inSPORTline Hawkie



INHALT

SICHERHEITSHINWEISE.....	3
PRODUKTBESCHREIBUNG	5
HERAUSNEHMEN AUS DER VERPACKUNG UND ERSTE VORBEREITUNG.....	5
BEDIENTEIL.....	7
BEDIENTEIL UND JOYSTICK	7
FERNBEDIENUNG	8
FESTSTELLBREMSE	10
ROLLSTUHL ZUSAMMENKLAPPEN	11
BATTERIE ENTFERNEN	11
BATTERIE	11
BATTERIE LADEN	12
BATTERIE-INFORMATIONEN	12
WARTUNG UND LAGERUNG	12
UMWELTSCHUTZ	12
GARANTIEBEDINGUNGEN, REKLAMATIONEN	13

SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie das Handbuch vor dem Gebrauch und bewahren Sie es zum Nachschlagen auf.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es scharfe Kanten aufweist.
- Im Falle einer Störung stellen Sie den Betrieb sofort ein und kontaktieren Sie den Kundendienst. Reparieren Sie den Rollstuhl nicht selbst.
- Machen Sie sich vor der Benutzung mit dem Gerät vertraut, suchen Sie einen sicheren und offenen Raum auf, und lassen Sie sich von einer anderen Person helfen, bis Sie das Gerät sicher benutzen können.
- Vergewissern Sie sich vor dem Auf- und Absteigen, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- Stellen Sie Ihre Geschwindigkeit immer so ein und fahren Sie immer so schnell, dass Sie weder sich selbst noch andere Personen und deren Eigentum gefährden.
- Wir empfehlen, immer mit der niedrigsten Geschwindigkeitsstufe zu starten.
- Einige Kommunikationsgeräte können auf der gleichen Frequenz arbeiten wie die Fernsteuerung des Rollstuhl. Wenn Sie ein solches Gerät bei sich haben (Telefon usw.), prüfen Sie immer zuerst, ob es die Steuerung nicht beeinträchtigt.
- Einige Sender können die Fernsteuerung des Rollstuhls stören.
- Wenn Sie eine unerwünschte Bewegung beobachten oder wenn der Rollstuhl plötzlich stehen bleibt, schalten Sie ihn sofort aus.
- Das Produkt darf nicht manipuliert, verändert oder modifiziert werden.
- Wenn eine der folgenden Situationen eintritt, schalten Sie den Rollstuhl sofort aus: plötzliche Bewegung ohne Benutzereingabe, Fahrtrichtung nicht kontrollierbar, Versagen der Bremsen.
- Der Rollstuhl ist für die Beförderung einer Person bestimmt.
- Fahren Sie nicht zu steil bergaufwärts.
- Fahren Sie nicht unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol.
- Kuppeln Sie keine anderen Fahrzeuge oder Gegenstände hinter dem Rollstuhl an.
- Sie dürfen den Rollstuhl nicht an andere Fahrzeuge anhängen.
- Das maximal zulässige Gefälle darf nicht überschritten werden.
- Bewegen Sie den Joystick nicht plötzlich, wenn der Rollstuhl in Bewegung ist.
- Befördern Sie niemals andere Personen im Rollstuhl und überschreiten Sie nicht die maximale Tragfähigkeit des Rollstuhls.
- Schalten Sie den Rollstuhl nicht aus, wenn er sich in normaler Bewegung befindet, Sie könnten den Motor oder die Steuerung beschädigen. Schalten Sie den Rollstuhl während der Fahrt NUR aus, wenn Sie die Kontrolle über ihn verlieren.
- Fahren Sie nicht auf nicht befestigten Flächen (Sand, tiefes Gras, feine Erde usw.)
- Befahren Sie keine Treppen.
- Stellen Sie sicher, dass der Rollstuhl vor der Reinigung und Wartung ausgeschaltet ist.
- Schalten Sie den Rollstuhl nur ein, wenn Sie auf ihm sitzen.
- Der Rollstuhl ist nicht für den normalen Straßenverkehr bestimmt. Fahren Sie nur auf den dafür vorgesehenen Wegen (Bürgersteig).
- Wechseln Sie nicht plötzlich die Richtung (vorwärts - rückwärts). Wechseln Sie die Richtung, wenn der Rollstuhl anhält.
- Fahren Sie bergab immer mit der niedrigsten Geschwindigkeit und halten Sie den

Joystick in der mittleren Position.

- Lassen Sie Ihre Füße immer auf der Fußstütze.
- Vergewissern Sie sich vor der Fahrt, dass die Batterie vollständig geladen ist.
- Laden Sie den Rollstuhl in einem gut belüfteten Raum auf.
- Vergewissern Sie sich vor der Fahrt, dass der Stuhl richtig festgezogen und zusammengebaut ist.
- Vergewissern Sie sich vor dem Rückwärtsfahren, dass sich kein Hindernis hinter Ihnen befindet. Fahren Sie auf die niedrigste Geschwindigkeit rückwärts.
- Vermeiden Sie sporadische Bewegungen und plötzliche Richtungswechsel.
- Legen Sie Ihre Hände und Füße auf die Armlehnen.
- Hindernisse, die höher als 5 mm sind, dürfen nicht überfahren werden.
- Fahren Sie nicht über Lücken, die länger als 10 cm sind.
- Die maximale Steigung beträgt 12°.
- Fahren Sie nicht rückwärts, wenn Sie bergauf fahren.
- Fahren Sie nicht auf einer Fläche, die um mehr als 3° zur Seite geneigt ist.
- Fahren Sie nicht auf weichem, unebenem oder ungesichertem Untergrund (Gras, Schotter).
- Stellen Sie die niedrigste Geschwindigkeit ein, bevor Sie bergab fahren, da sich der Bremsweg beim Bergabfahren verlängert.
- Fahren Sie nicht über unebene Flächen wie Randsteine usw.
- Fahren Sie nicht im Wasser, auf Eis oder Schnee oder bei schlechten Sichtverhältnissen.
- Setzen Sie den Rollstuhl nicht der direkten Sonneneinstrahlung und Witterung aus.
- Vor Regen und Wasser schützen.
- Das Bedienteil ist nicht wasserdicht.
- Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand der Reifen. Ersetzen Sie verschlissene Reifen sofort.
- Fahren Sie nicht im Regen oder auf nassen Straßen. Es besteht die Gefahr, dass die Elektronik und die Batterie beschädigt werden.
- Die Fernbedienung wird mit 2x AAA-Batterien betrieben
- Gesamtbelastbarkeit: 110 kg
- Fernsteuerung bis zu 15 m (je nach Umgebungsbedingungen)
- Höchstgeschwindigkeit bis zu 6 km/h unter optimalen Bedingungen
- Maximale Reichweite von bis zu 24 km unter optimalen Bedingungen
- Der Rollstuhl wird von 2x 350W Motoren angetrieben

PRODUKTBESCHREIBUNG



1.	Schaumstoffgriff	7.	Stauraum
2.	360°-Joystick	8.	Abnehmbare Batterie
3.	Atmungsaktiver Sitz	9.	13"-Hinterräder
4.	Stoßdämpfer	10.	Seitentaschen
5.	Aluminium-Fußstütze	11.	Höhenverstellbare Armlehnen
6.	8"-Vorderräder	12.	Verstellbare Rückenlehne

HERAUSNEHMEN AUS DER VERPACKUNG UND ERSTE VORBEREITUNG

Nehmen Sie den Stuhl und alle Teile aus der Verpackung und vergewissern Sie sich, dass alle Teile vorhanden sind.



Bringen Sie den Joystick an der rechten Seite des Griffs an.



Fassen Sie den Stuhl am Griff der Lehne und am Sitz an und klappen Sie den Rollstuhl auf.



Ziehen Sie die Verriegelungsschnalle fest (legen Sie die U-förmige Schnalle auf die Verriegelungsschnalle und ziehen Sie sie nach unten)



Drücken Sie die Armlehnen nach unten und verriegeln Sie sie mit dem Drehknopf, indem Sie ihn nach oben drehen.




BEDIENTEIL



1.	Batteriestandsanzeige	5.	Hupe
2.	Ein/Aus-Taste	6.	Geschwindigkeit erhöhen +
3.	Geschwindigkeitsstufe	7.	360°-Joystick
4.	Geschwindigkeit reduzieren -		

Sobald Sie auf dem Rollstuhl sitzen, probieren Sie einfache Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen aus, wobei Sie Ihre Geschwindigkeit auf der niedrigsten Stufe halten.

Nachdem Sie die Grundbewegungen beherrschen, versuchen Sie die S-förmige Bewegung in die Kurven.

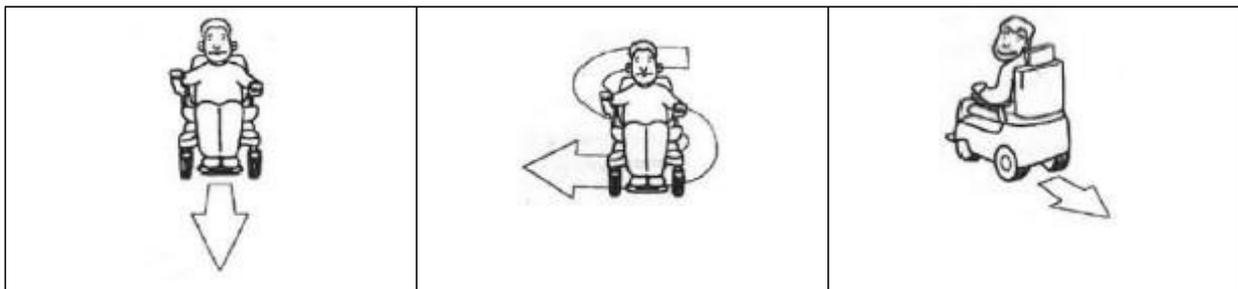


BEDIENTEIL UND JOYSTICK

Bringen Sie das Bedienteil am rechten Griff an.

Stellen Sie den gewünschten Abstand ein und ziehen Sie die Mutter fest. Auf der rechten und linken Seite an den Motor und die Batterie anschließen.

1. Joystick
2. Bedienfeld und Tasten
3. Stromanschlüsse

Bedienelemente und Tasten	Blick auf das gesamte Bedienteil	Stromanschlüsse
---------------------------	----------------------------------	-----------------

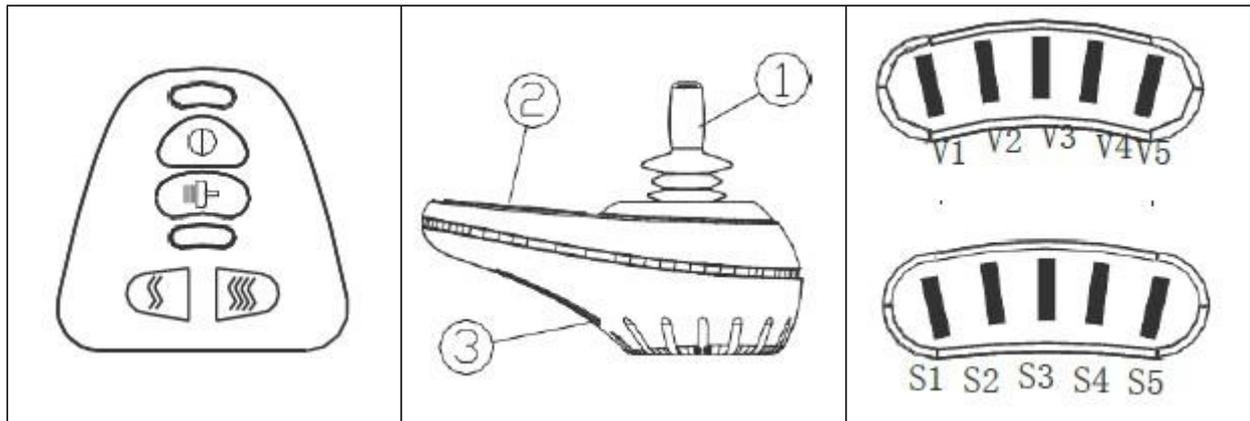

Schützen Sie das Bedienteil vor Stößen und Beschädigungen. Vergewissern Sie sich vor der Fahrt, dass das Bedienteil richtig angeschlossen ist und auf Ihre Eingaben reagiert.

Lassen Sie den Rollstuhl und das Bedienteil nicht über einen längeren Zeitraum in einer feuchten Umgebung stehen. Vor Kontamination durch Lebensmittel oder die Umwelt schützen.

Reinigen Sie das Bedienteil vorsichtig mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.

	1.	Batterieladeanzeige
	2.	Ein/Aus-Taste
	3.	Hupe
	4.	Geschwindigkeitsanzeige
	5.	Geschwindigkeit erhöhen
	6.	Geschwindigkeit reduzieren

Mit der Ein/Aus-Taste wird der Rollstuhl ein- und ausgeschaltet. In Krisensituationen kann der Rollstuhl damit sofort abgeschaltet werden.

Die Batteriestandsanzeige zeigt den aktuellen Ladezustand der Batterie an. Die Anzeige zeigt den Batteriestand nach dem Einschalten an. Beim Einschalten des Rollstuhl leuchten alle Anzeigen auf; beim Ausschalten erlöschen alle Anzeigen.

Mit dem Joystick werden die Geschwindigkeit und die Fahrtrichtung gesteuert. Je weiter der Joystick von der Mitte entfernt ist, desto höher ist die Geschwindigkeit der Bewegung. Wenn der Joystick losgelassen oder zentriert wird, hält der Rollstuhl an.

Die Anzeige der Geschwindigkeitsstufe wird in 5 Segmenten angezeigt: 1 (niedrigste Stufe) - 5 (höchste Stufe). Drücken Sie die Hupentaste, um ein akustisches Warnsignal zu geben.

Mit den Geschwindigkeitstasten wird die Geschwindigkeit erhöht oder verringert.

FERNBEDIENUNG

Die Fernbedienung wird mit 2x AAA-Batterien betrieben. Die Fernbedienung arbeitet mit 2,4 GHz



Schalten Sie das Bedienteil am Rollstuhl ein.




Drücken Sie die Einschalttaste auf der Fernbedienung für 5 Sekunden.



Halten Sie die Taste zur Geschwindigkeitsreduzierung gedrückt, bis die Geschwindigkeitsanzeige gelb wird.



Drücken Sie die Hupe, die Bedienung wechselt in den Kopplungsmodus.

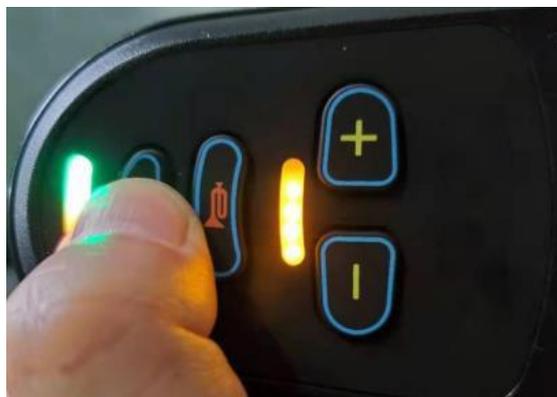

Halten Sie die Pfeiltaste nach unten auf der Fernbedienung gedrückt, bis die Einschalttaste auf der Fernbedienung nicht mehr blinkt.



Die Bedienungen sind gekoppelt.



FESTSTELLBREMSE

An den Hinterrädern befindet sich eine Feststellbremse. Verwenden Sie nach dem Abstellen die mechanische Bremse, um den Rollstuhl anzuhalten. Ist die Bremse in der Stellung „manual“, kann der Elektrorollstuhl wie ein herkömmlicher Rollstuhl geschoben werden.



WARNUNG: Schieben Sie den Rollstuhl nur, wenn Sie sich an einem Ort befinden, an dem der Elektromotor nicht benutzt werden kann.

Um den Wagen zu schieben, betätigen Sie die Feststellbremsen, so dass sich der Rollstuhl bewegen lässt, und schieben Sie den Rollstuhl.

ROLLSTUHL ZUSAMMENKLAPPEN

Drehen Sie den Knopf nach unten, um die Lehne zu lösen.




Lösen Sie den hinteren Träger, entfernen Sie die U-Schnalle.

Fassen Sie den Sitz und die Rückenlehne und klappen Sie den Stuhl zusammen.



BATTERIE ENTFERNEN

1. Ziehen Sie das Stromkabel ab.
2. Drücken Sie die Verriegelung, um die Batterie vom Rahmen zu trennen, und ziehen Sie die Batterie heraus.

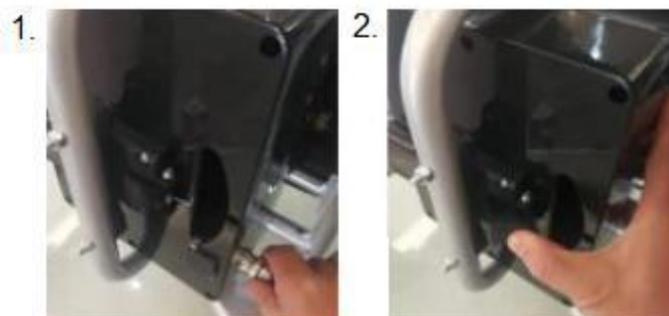

BATTERIE

Der Rollstuhl ist mit einer 24 V 12 Ah Lithium-Batterie ausgestattet. Wechseln Sie die Batterie nur in einem autorisierten Servicecenter.

6 Monate Garantie auf die Lebensdauer der Batterie - die Nennkapazität der Batterie wird innerhalb von 6 Monaten nach dem Verkauf des Produkts nicht unter 70% ihrer Gesamtkapazität fallen.

Befolgen Sie die Anweisungen im Handbuch, um die ordnungsgemäße Funktion und den sicheren Gebrauch der Batterie zu gewährleisten. Wenn die Batterie beschädigt ist, Flüssigkeit ausläuft oder ungewöhnlich riecht, stellen Sie die Verwendung der Batterie sofort ein.

- Die Lebensdauer der Batterie ist begrenzt. Wenn Sie eine Batterie verwenden, die ihre normale Lebensdauer überschritten hat, kann sich die Ladefrequenz erhöhen und die Reichweite verringern.
- Öffnen Sie die Batterie nicht und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Stecken Sie keine fremden Gegenstände in die Batterie.
- Berühren Sie die Batterie nicht mit Metallgegenständen. Die Batterie kann explodieren oder beschädigt werden.
- Verwenden Sie nur das Original-Ladegerät.
- Beachten Sie beim Fahren die örtlichen Vorschriften und Gesetze.
- Sie können die Batterie kontinuierlich aufladen.
- Die ideale Temperatur zum Laden der Batterie liegt zwischen +10 °C und +30 °C.
- Wenn Sie die Batterie in einer kalten Umgebung verwenden, ist ihre Reichweite geringer.
- Reparieren oder modifizieren Sie die Batterie nicht selbst. Reparieren oder modifizieren Sie die Batterie nicht selbst.

BATTERIE LADEN

Die Batterie wird mit einem AC 110 - 240V 50 - 60 Hz, 24V Ausgang, 2Ah Ladegerät geladen.

Laden Sie die Batterie vor dem ersten Gebrauch auf. Entladen Sie dann die Batterie, indem Sie sie benutzen, fahren Sie nicht schnell und entfernen Sie sich nicht zu weit von Ihrem Wohnort, bis Sie wissen, wie Sie den Rollstuhl bedienen müssen. Laden Sie dann die Batterie erneut für 8 bis 14 Stunden auf. Nach 4 - 5 Ladezyklen wird die Batteriekapazität zu 100% genutzt.

BATTERIE-INFORMATIONEN

Laden Sie die Batterie so oft wie möglich nach dem Gebrauch auf. Die Batterie entlädt sich allmählich, auch wenn sie nicht benutzt wird. Laden Sie die Batterie einmal pro Woche auf, wenn Sie den Rollstuhl nicht regelmäßig benutzen. Verwenden Sie nur das Original-Ladegerät.

WARTUNG UND LAGERUNG

- Verwenden Sie zur Reinigung milde Reinigungsmittel und ein feuchtes Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.
- Trocknen Sie alle Teile immer gut ab, insbesondere elektronische Teile.
- Halten Sie die Fernbedienung und das Bedienteil von Feuchtigkeit fern.
- Überprüfen Sie den Zustand der Kabel und Anschlüsse.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine Wasserstrahlen oder Hochdruckreiniger.
- Lagern Sie den Rollstuhl an einem gut belüfteten Ort, der frei von korrosiven Gasen ist und eine Luftfeuchtigkeit von weniger als 80% aufweist.

UMWELTSCHUTZ

Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer oder wenn eine weitere Reparatur wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll ist, entsprechend den örtlichen Vorschriften und auf umweltfreundliche Weise. Bringen Sie das Produkt zu der nächstgelegenen ausgewiesenen Sammelstelle.

Indem Sie es vorschriftsgemäß entsorgen, tragen Sie dazu bei, wertvolle natürliche Ressourcen zu

erhalten und negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich an die zuständigen örtlichen Behörden, um einen Verstoß gegen die Vorschriften und die damit verbundenen Strafen zu vermeiden.

Werfen Sie Batterien nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie sie dem Recycling zu.

GARANTIEBEDINGUNGEN, REKLAMATIONEN

Allgemeine Bestimmungen und Begriffsbestimmungen

Diese Garantiebedingungen und die Reklamationsregeln regeln die Bedingungen und den Umfang der Garantie, die der Verkäufer für die an den Käufer gelieferten Waren gewährt, sowie das Verfahren für die Bearbeitung von Reklamationen des Käufers für die gelieferten Waren. Für die Garantiebedingungen und die Reklamationsregeln gelten die einschlägigen Bestimmungen des Gesetzes Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch, und des Gesetzes Nr. 634/1992 Slg. über den Verbraucherschutz in der jeweils geltenden Fassung, und zwar auch in Angelegenheiten, die in diesen Garantiebedingungen und den Reklamationsregeln nicht erwähnt werden.

Verkäufer ist die Firma SEVEN SPORT s.r.o. mit Sitz in Strakonická 1151/2c, Prag 150 00, IdNr.: 26847264, eingetragen im Handelsregister des Kreisgerichts in Prag, Abteilung C, Nummer 116888.

Im Rahmen der geltenden Rechtsvorschriften wird zwischen einem Käufer, der Verbraucher ist, und einem Käufer, der kein Verbraucher ist, unterschieden.

Ein „Verbraucherkäufer“ oder „Verbraucher“ ist eine Person, die beim Abschluss und bei der Erfüllung eines Vertrags nicht im Rahmen ihrer beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit handelt.

„Ein Käufer, der kein Verbraucher“ ist, ist ein Unternehmer, der Produkte kauft oder Dienstleistungen in Anspruch nimmt, um mit diesen Produkten oder Dienstleistungen Geschäfte zu machen. Für den Käufer gelten der Rahmenkaufvertrag und die Geschäftsbedingungen, soweit sie auf ihn anwendbar sind.

Die vorliegenden Garantiebedingungen und die Reklamationsregeln sind Bestandteil jedes zwischen dem Verkäufer und dem Käufer geschlossenen Kaufvertrags. Die Garantiebedingungen und die Reklamationsregeln sind gültig und verbindlich, es sei denn, die Parteien haben im Kaufvertrag oder in einem Nachtrag zu diesem Vertrag oder einer anderen schriftlichen Vereinbarung etwas anderes vereinbart.

Garantiebedingungen

Garantiezeit

Der Verkäufer gewährt dem Käufer eine Garantie für die Qualität der Ware für einen Zeitraum von 24 Monaten, es sei denn, aus dem Garantieschein, der Rechnung für die Ware, dem Lieferschein oder einem anderen Dokument für die Ware geht eine andere Länge der vom Verkäufer gewährten Garantiezeit hervor. Die gesetzliche Dauer der dem Verbraucher gewährten Garantie bleibt davon unberührt.

Mit der Qualitätsgarantie übernimmt der Verkäufer die Verpflichtung, dass die gelieferte Ware während eines bestimmten Zeitraums für den üblichen oder vereinbarten Verwendungszweck tauglich ist und die üblichen oder vereinbarten Eigenschaften behält.

Batterie

6 Monate Garantie auf die Lebensdauer der Batterie - die Nennkapazität der Batterie wird innerhalb von 6 Monaten nach dem Verkauf des Produkts nicht unter 70% ihrer Gesamtkapazität fallen.

Die Garantiebedingungen gelten nicht für Mängel (falls für das gekaufte Produkt zutreffend), die verursacht wurden durch:

- Verschulden des Benutzers, d.h. Beschädigung des Produkts durch unsachgemäße Reparatur, falsche Montage, unzureichendes Einsetzen der Sattelstütze in den Rahmen, unzureichendes Festziehen der Pedale in den Kurbeln und der Kurbeln auf der Mittelachse
- unsachgemäße Wartung
- mechanische Beschädigung

- Abnutzung von Teilen bei normalem Gebrauch (z. B. Gummi- und Kunststoffteile, bewegliche Mechanismen, Gelenke, Abnutzung von Bremsbelägen, Kette, Reifen, Kettenblatt/Ritzel, usw.)
- ein unabwendbares Ereignis, eine Naturkatastrophe
- unsachgemäße Eingriffe
- unsachgemäße Handhabung oder unsachgemäße Platzierung, niedrige oder hohe Temperaturen, Wirkung von Wasser, übermäßigen Druck und Stöße, absichtliche Veränderung von Design, Form oder Abmessungen

Reklamationsregeln

Verfahren zur Reklamation mangelhafter Ware

Der Käufer ist verpflichtet, die vom Verkäufer gelieferte Ware so schnell wie möglich nach dem Übergang der Gefahr von Schäden an der Ware oder nach der Lieferung zu überprüfen. Die Prüfung muss vom Käufer so durchgeführt werden, dass alle Mängel festgestellt werden, die bei einer angemessenen fachmännischen Prüfung festgestellt werden können.

Bei der Reklamation von Waren ist der Käufer verpflichtet, den Kauf und die Rechtmäßigkeit der Reklamation auf Verlangen des Verkäufers durch eine Rechnung oder einen Lieferschein mit angegebener Produktionsnummer (Seriennummer) oder durch dieselben Dokumente ohne Seriennummer nachzuweisen. Weist der Käufer die Rechtmäßigkeit der Reklamation nicht mit diesen Unterlagen nach, hat der Verkäufer das Recht, die Reklamation zurückzuweisen.

Wenn der Käufer einen Mangel meldet, der nicht unter die Garantie fällt (z.B. weil die Garantiebedingungen nicht erfüllt sind, der Mangel irrtümlich gemeldet wurde usw.), ist der Verkäufer berechtigt, die vollständige Erstattung der Kosten zu verlangen, die im Zusammenhang mit der Beseitigung des vom Käufer gemeldeten Mangels entstanden sind. In diesem Fall erfolgt die Berechnung des Serviceeinsatzes auf der Grundlage der gültigen Preisliste für Arbeitsleistungen und Transportkosten.

Stellt der Verkäufer (durch Prüfung) fest, dass das reklamierte Produkt nicht fehlerhaft ist, gilt die Reklamation als unberechtigt. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, die Zahlung der im Zusammenhang mit einer unberechtigten Reklamation entstandenen Kosten zu verlangen.

Beanstandet der Käufer unter den geltenden Garantiebedingungen des Verkäufers Mängel an der Ware, so behebt der Verkäufer den Mangel, indem er das mangelhafte Teil oder Gerät repariert oder durch ein mangelfreies ersetzt. Der Verkäufer ist berechtigt, mit Zustimmung des Käufers anstelle der mangelhaften Ware eine andere, funktionell voll kompatible Ware zu liefern, die mindestens die gleichen oder bessere technische Parameter aufweist. Die Entscheidung darüber, wie eine Reklamation nach diesem Absatz zu behandeln ist, liegt beim Verkäufer.

Der Verkäufer hat die Reklamation innerhalb von 30 Tagen nach Lieferung der mangelhaften Ware zu bearbeiten, sofern nicht eine längere Frist vereinbart wurde. Das Datum der Bearbeitung ist das Datum, an dem die reparierte oder ersetzte Ware dem Käufer übergeben wird. Ist der Verkäufer aufgrund der Art des Mangels nicht in der Lage, die Reklamation innerhalb der angegebenen Frist zu bearbeiten, muss er sich mit dem Käufer auf eine alternative Lösung einigen. Kommt eine solche Einigung nicht zustande, ist der Verkäufer verpflichtet, dem Käufer einen finanziellen Ausgleich in Form einer Gutschrift zu gewähren.

CZ SEVEN SPORT s.r.o.

Sitz: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, Tschechien
 Zentrale: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
 Reklamationen und Service: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IdNr.: 26847264
 UID-Nr.: CZ26847264

Tel: +420556300970

E-Mail: eshop@insportline.cz

reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.

Zentrale, Reklamationen, Service: Električná 6471, Trenčín 911 01, Slowakei

IdNr.: 36311723

UID-Nr.: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701

E-Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum des Verkaufs:

Stempel und Unterschrift des Verkäufers:

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Importeur:

Seven sport s.r.o.,
Strakonická 1151 / 2C
Praha 5-Hlubočepy 150 00
IdNr.: 268 47 264
Tschechische Republik

erklärt in eigener Verantwortung, dass

**das Produkt IN25639 Elektrorollstuhl inSPORTline Hawkie
(W5521)**

in Übereinstimmung

mit den technischen Anforderungen an das Produkt, die in den
Regierungsverordnungen festgelegt sind, **steht**

**Das Produkt entspricht der Richtlinie (EU) 2017/745 und den folgenden
Normen:**

EN ISO 14971:2019	EN ISO 15233-1:2016
EN 1041: 2008+A1:2013	ISO 10993-10:2013
EN ISO:10993-5:2009	EN ISO 10993-10:2013
EN 60601-1:2016	EN12184:2014
ISO7176	

MSDS / TCT221212M105 / 1.1.2023 (UN3480, UN3481, UN3171)

Hersteller:

**Zhejiang Innuovo Rehabilitation
Devices Co.**

**No.196 Industy Road, Hengdian
Movie Zone, Dongyang, Zhjiang,
China**

Vítkov 24.02.2023



Seven Sport s.r.o.
Bořbojova 35/57B, 130 00 Praha 3
IČO: 26847264 DIČ: CZ26847264
tel./fax: +420 550 300 970 